

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
DYSK SENSORYCZNY
PILO-2034
„WYRÓB MEDYCZNY”**



UWAGA! Przed przystąpieniem do pierwszego użycia wyrobu należy zapoznać się z niniejszym dokumentem.

Przy zakupie należy sprawdzić kompletność oraz stan jakościowy wyrobu. Ewentualne zastrzeżenia zgłosić osobie wydającej. Zgłaszając zastrzeżenia ilościowe/jakościowe, należy postępować zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej tj. przedstawić dowód zakupu oraz wypełnioną przez punkt detaliczny kartę gwarancyjną.

I. OPIS WYROBU

Dysk sensoryczny przeznaczony do rehabilitacji pourazowej, ćwiczeń równoważnych, sensomotorycznych i korekcyjnych. Doskonala do ćwiczeń korygujących wady postawy, poprawiających kondycję, wzmacniających mięśnie i zwiększających ruchomość stawów. Wyposażony w wypustki na górnej powierzchni, które dodatkowo stymulują receptory na skórze oraz zapewniają mikromasaż i rozluźnienie mięśni. Podczas siedzenia odciaża odcinek lędźwiowy kręgosłupa i wymusza prawidłową pozycję

II. WŁAŚCIWOŚCI

Wykonana jest z najwyższej jakości materiału PVC, który zapobiega nagłemu pęknięciu piłki przy jej uszkodzeniu, zapewniając powolną i równomierną utratę powietrza. Przeznaczona do użytku wewnątrz na płaskiej i twardej powierzchni.

Rozmiar: średnica 34 cm

III. SPOSÓB UŻYCIA

1. Pociągnij za uchwyt pompki, aby wyjąć igłę do nadmuchiwania z pompki.
2. Wkręć igłę w końcówkę pompki.
Zwilż igłę przed włożeniem jej do zaworu tarczowego. Zawór to mały otwór znajdujący się w pobliżu obwodu dysku sensorycznego
3. Ostrożnie włóż igłę pod niewielkim kątem do zaworu, wykonując lekki ruch obrotowy. Upewnij się, że igła jest wsunięta do końca.
4. Napompuj do pożądanego poziomu. Maksymalna zalecana wysokość napompowania to 10-12 cm.



IV. SKŁAD

polichlorek winylu (PVC) 100%

V. ZASADY UŻYTKOWANIA

- Produkt i jego elementy należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem,
- Produkt należy utrzymywać w czystości zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji. Niewłaściwe czyszczenie i konserwacja wyrobu może prowadzić do zniszczenia..
- Produkt nie są zabawką. Nadzór dorosłych jest wymagany przez cały czas, gdy dzieci używają produktu.
- Nie nadmuchiwać powyżej maksymalnej dopuszczalnej wielkości zaznaczonej na opakowaniu.
- Produkt trzymać z dala od ostrych przedmiotów
- nie wystawiać na bezpośrednie działanie słońca.
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.





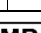
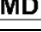




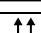
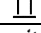

VI. PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować u pacjentów z zaburzeniami i czucia oraz osób ze zmianami skórnymi typu owrzodzenia, pęcherze, otarcia itp.
- przed użyciem zalecana jest konsultacja z rehabilitantem lub fizjoterapeutą.
- stany bezpośrednio po zwichnięciach czy złamaniach kości
- niezakończony wzrost kostny
- stany zapalne stawów i tkanek okołostawowych
- świeże blizny pooperacyjne lub inne rany

VII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Unikaj wysokiej temperatury
- Myj ciepłą wodą i delikatnym detergentem
- Nie używać środków ściernych
- Nie czyścić chemicznie
- Suszyć na płasko w zacienionym oraz przewiewnym miejscu – nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Produkt nie jest odporny na ciepło i traci swoje właściwości w wysokiej temperaturze.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Wytwórca
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Wyrób medyczny
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ostrzeżenie
	Numer serii
	Góra, nie przewracać
	Przechowywać w suchym miejscu
	Delikatne, obchodzić się ostrożnie
	Nie przecinać
	Opakowanie nadaje się do recyklingu



**KARTA GWARANCYJNA
DYSK SENSORYCZNY
PILO-2034**

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęć sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Wyrób objęty jest 12 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że produkt był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa/Wymiana zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją pasa opisane w instrukcji użytkowania;
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia produktu
 - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.