

INSTRUKCJA UŻYWANIA

KACZKA SANITARNA (męska)

PRZEZNACZENIE

Wyrób przeznaczony jest do stosowania w jednostkach leczniczych i w warunkach domowych do obsługi ludzi obłożnie chorych, w celu łagodzenia skutków urazów i przebiegu chorób. Wyrób służy do oddawania i zbiórki moczu. W przypadku stosowania wyrobu przez osoby starsze i/ lub unieruchomione wymagana jest pomoc innych osób.

CHARAKTRYSTYKA

Wyrób wykonany jest w 100 % z polietylenu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Myć popularnymi środkami myjącymi niezawierającymi substancji ściernych.

Dezynfekcję można przeprowadzać jednym ze środków przeznaczonych i stosowanych w placówkach służby zdrowia służących do dezynfekcji tego typu wyrobów.

Wyrób może być poddawany sterylizacji termicznej w atmosferze suchego powietrza o temp. 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126 °C.

⚠ OSTRZEŻENIA

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

- Nie używać pękniętego wyrobu.
- Stosować i przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie podgrzewać otwartym ogniem.
- Opakowanie wyrobu nie jest zabawką.

Wyjaśnienie symboli

 Producent	 Data użycia	 Data produkcji	 Zajrzyj do instrukcji używania	 Ostrzeżenie
 Oznakowanie CE	 Wyrób medyczny	 Numer modelu	 Numer katalogowy	 Kod partii