


FootWave™ SUPPORT 3/4

PŁASKOSTOPIE, KOŚŁAWOŚĆ STÓP I KOLAN

FOOTWave™

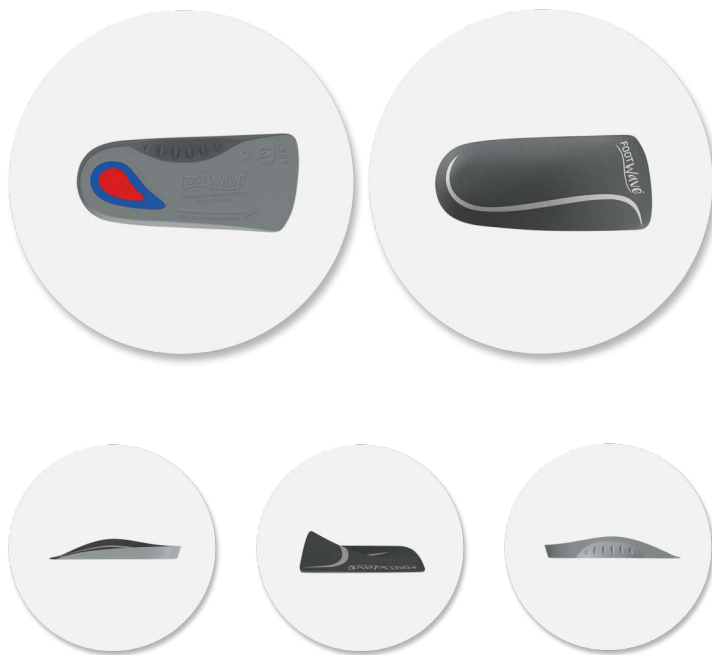

OPIS PRODUKTU:

FootWave SUPPORT 3/4 to dynamiczne wkładki ortopedyczne dla każdego, kto boryka się z bólem stóp (w tym przede wszystkim pięt), koślawością oraz umiarkowanym płaskostopiem. Stanowią również świetną profilaktykę, dzięki stosowaniu której możemy uniknąć powyższych dolegliwości. To idealne wkładki ortopedyczne do codziennego użytku w pracy lub szkole. Ich głównym zadaniem jest ustabilizowanie prawidłowego ustawienia stóp oraz odciążenie łuków podszwowych. Dzięki tym wkładkom uzyskasz komfort poruszania się a Twoje stopy będą mniej zmęczone.

DOBÓR I CZYSZCZENIE WKŁADEK:

Usuń fabryczne wkładki z butów przed włożeniem wkładek FootWave. Przyzwyczajaj stopy do wsparcia ich łuków używając wkładek przez kilka godzin dziennie, stopniowo zwiększając czas używania, aż do osiągnięcia pełnego komfortu. Wkładki można czyścić przy pomocy wilgotnej szmatki nasączonej mydłem. Nie należy ich moczyć, wkładać do pralki, suszarki oraz suszyć na kaloryferze.

ZAOPATRUJĄC SIĘ WE WKŁADKI FOOTWAVE™ SUPPORT 3/4:

- 1 POCZUJESZ ULGĘ W BÓLU STÓP, KOLAN, BIODER, PLECÓW**
ich konstrukcja umożliwia optymalny rozkład nacisków na podłoże, przy jednoczesnym podtrzymaniu wysklepienia stopy. Zapewnia to utrzymania prawidłowej postawy ciała i redukcję przeciążeń.
- 2 ZAPEWNIŚ AMORTYZACJĘ TYŁOSTOPIA**
Podwójny amortyzator kierunkowy tyłostopia absorbuje wstrząsy, zmniejszając ból pięty.
- 3 ZAPEWNIŚ WYRÓWNANIE OSI KOŃCZYN DOLNYCH**
Wkładki FootWave SUPPORT 3/4 dają stopom naturalne wsparcie i stabilizację, przywracając im ich prawidłowy kształt i zakres ruchów.
- 4 ZAPEWNIĄ KOMFORT PORUSZANIA SIĘ**
Miękki materiał wyściółki zapobiega obtarciom i sprawia, że wkładki są bardzo wygodne. Dzięki wsparciu stopy będą mniej zmęczone i będzie chodziło się łatwiej.

TABELA ROZMIARÓW:

EXTRA SMALL XS	SMALL S	MEDIUM M	LARGE L	EXTRA LARGE XL
35 - 38	39 - 41	42 - 43	44 - 45	46 - 48

LINK DO TEGO PRODUKTU: <https://footwave.pl/wkladki-ortopedyczne/footwave-support-3-4>

 KUP ONLINE

DANE KONTAKTOWE

+48 506 310 411
info@footwave.pl
www.footwave.pl

PUNKTY SPRZEDAŻY

footwave.pl/kontakt

PRZEDAWACIELE

footmedical.pl/kontakt

PRODUCENT I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

www.footmedical.pl
biuro@footmedical.pl

SOCIAL MEDIA

/FootWavePL
/footwave_wkladki_dynamiczne


JAK DZIAŁA WKŁADKA FootWave™ SUPPORT 3/4

FOOTWave™

WIERZCH



SPÓD

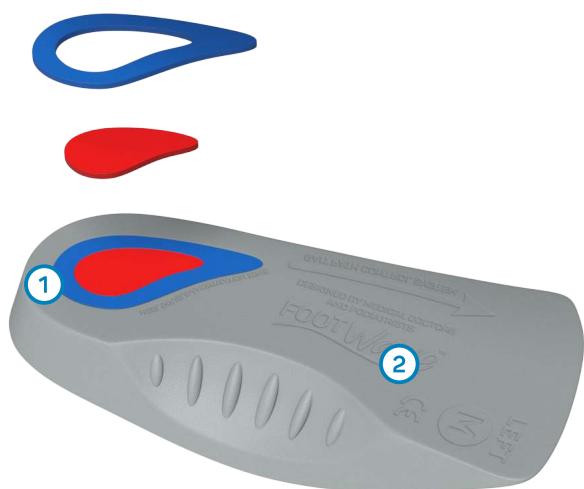

ELEMENT WKŁADKI	FUNKCJA	CO TO OZNACZA?
1 PODWÓJNY AMORTYZATOR KIERUNKOWY TYŁOSTOPIA	Absorpcja wstrząsów tyłostopia, kontrola ruchu 3D stawu skokowego, wprowadzenie w prawidłową supinację	Zmniejszy się ból pięty, a stopy będą poruszać się we właściwych kierunkach i zakresach ruchu
2 PŁASKI SPÓD WKŁADKI (PLATFORMA PODESZWOWA)	Stabilizacja, wyeliminowanie niekontrolowanej rotacji	Wkładki nie będą przekręcać się w obuwiu w sposób niekontrolowany podczas chodu, dzięki czemu korekcja i wsparcie będzie zawsze prawidłowe
3 GŁĘBOKIE, PROFILOWANE KORYTKO PIĘTOWE	Prawidłowe ustawienie osi kończyny dolnej w pozycji neutralnej, stabilizacja, wyeliminowanie niekontrolowanej rotacji	Twoje stopy nie będą przekręcać się w trakcie poruszania, a nogi będą pracować w prawidłowych osiach (nie będą się koślawić / szpotawić, pięty nie będą "uciekać" na zewnątrz / do wewnątrz)
4 PODPARCIE ŁUKÓW PODESZWOWYCH	Wsparcie dla struktur anatomicznych stopy (odciążenie rozciągniętego podszewowego)	Twoje łuki podszewowe (podłużny i poprzeczny) będą prawidłowo wysklepione, dzięki czemu stopy będą mniej się męczyć i pracować prawidłowo
5 WYŚCİÓŁKA Z MIKROFIBRY	Bezpieczeństwo, higiena, komfort	Miękki materiał zapobiega obtarciom, zapewnia wentylację i sprawia, że wkładki są bardzo wygodne

LINK DO TEGO PRODUKTU: <https://footwave.pl/wkladki-ortopedyczne/footwave-support-3-4>

KUP ONLINE

DANE KONTAKTOWE

+48 506 310 411
info@footwave.pl
www.footwave.pl

PUNKTY SPRZEDAŻY

footwave.pl/kontakt

PRZEDAWACIELE

footmedical.pl/kontakt

PRODUCENT I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

www.footmedical.pl
biuro@footmedical.pl

SOCIAL MEDIA

/FootWavePL
/footwave_wkladki_dynamiczne