


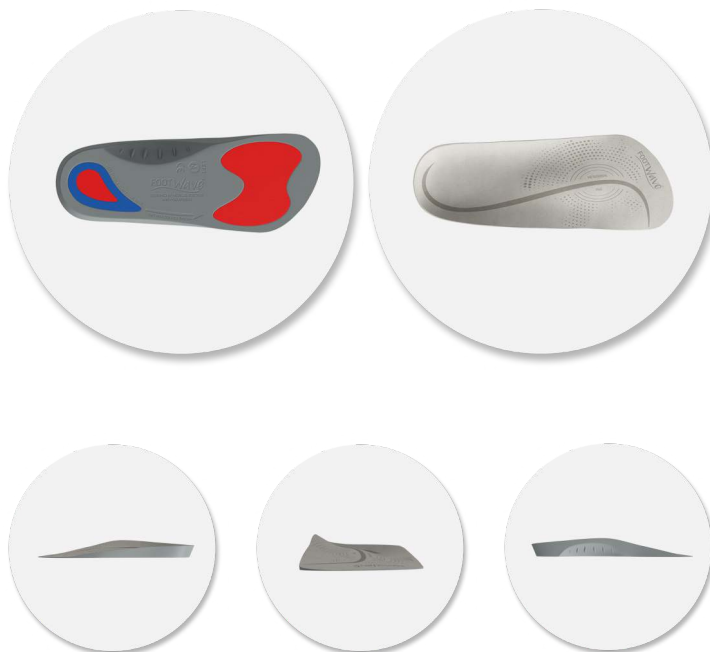

OPIS PRODUKTU:

UWAGA! Oferowana para wkładek jest długości 3/4 i jest to prawidłowa ich konstrukcja, zapewniająca poprawne działanie. Szukasz wkładki na płaskostopie poprzeczne pełnej długości? Model FootWave™ PŁASKOSTOPIE będzie odpowiedni.

Dolegliwości bólowe związane z płaskostopiem poprzecznym (tzw. metatarsalgia) utrudniają codzienne funkcjonowanie i znacząco wpływają na jakość życia. Wkładki FootWave™ PŁASKOSTOPIE POPRZECZNE zostały zaprojektowane przez podiatrów w celu skorygowania nadmiernej pronacji, koślawości stóp i opadających łuków podszwowych. Pomagają zmniejszyć ból nadwyrażonych stóp oraz poprawiają ogólną postawę ciała. Zapewniają idealne biomechaniczne wsparcie podczas chodzenia i codziennych aktywności.

Poprzez specjalne, anatomiczne wyprofilowanie łuków podszwowych unoszą odpowiednio kości śródstopia i rozciągno podeszwowe, odciążając je i pozwalając na regenerację, jednocześnie hamując rozwój deformacji w obrębie kości śródstopia i przodostopia. Korytka piętowe kontroluje ułożenie i ruch tyłostopia, dbając o to, aby stopy były ustawione prawidłowo podczas chodzenia w każdej fazie cyklu chodu. Takie leczenie usuwa bezpośrednio przyczyny powstawania płaskostopia poprzecznego.

Poprzez przywrócenie naturalnego wzorca chodu wkładki FootWave™ łagodzą wiele innych, powszechnych dolegliwości bólowych, takich jak ból kręgosłupa i kolan. Dzięki tym wkładkom uzyskasz komfort poruszania się, a Twoje stopy będą mniej zmęczone. Dynamiczne wkładki FootWave™ PŁASKOSTOPIE POPRZECZNE stabilizują stopę oraz redukują przeciążenia. Wkładki FootWave™ mogą być stosowane zarówno w przypadku leczenia chorób stopy, jak i w ramach profilaktyki występowania nieprawidłowości budowy stóp i postawy.

ZAOPATRUJĄC SIĘ WE WKŁADKI FOOTWAVE™ PŁASKOSTOPIE POPRZECZNE:

- 1 POCZUJESZ ULGĘ W BÓLU PRZEDNIEJ CZĘŚCI STOPY**
Dzięki specjalnie zaprojektowanemu kształtowi wkładki stopa jest dobrze podparta i ból związany z płaskostopiem znika.
- 2 ZAPEWNI SZ WSPARCIE ŁUKÓW PODESZWOWYCH**
Wkładki FootWave™ PŁASKOSTOPIE POPRZECZNE posiadają dodatkową wyniosłość śródstopia (pelotę metatarsalną) dla wsparcia wysklepienia poprzecznego stopy.
- 3 ZMNIEJSZYSZ BÓL KOLAN, BIODER, PLECÓW (KRĘGOSŁUPA)**
Prawidłowe wysklepienie łuków podszwowych i ustawienie stopy redukuje przeciążenia w wyższych partiach, zmniejszając ból. Przywraca symetrię chodzenia i postawy ciała.
- 4 ZWIĘKSZYSZ KOMFORT PORUSZANIA SIĘ**
Miękki materiał wyściółki zapobiega obtarciom i sprawia, że wkładki są bardzo wygodne.

DOBÓR I CZYSZCZENIE WKŁADEK:

Usuń fabryczne wkładki z butów przed włożeniem wkładek FootWave. Przyzwyczajaj stopy do wsparcia ich łuków używając wkładek przez kilka godzin dziennie, stopniowo zwiększając czas używania, aż do osiągnięcia pełnego komfortu. Wkładki można czyścić przy pomocy wilgotnej szmatki nasączonej mydłem. Nie należy ich moczyć, wkładać do pralki, suszarki oraz suszyć na kaloryferze.

TABELA ROZMIARÓW:

EXTRA SMALL XS	SMALL S	MEDIUM M	LARGE L
35 - 38	39 - 41	42 - 43	44 - 45

LINK DO TEGO PRODUKTU: <https://footwave.pl/wkladki-ortopedyczne/footwave-plaskostopie-poprzeczne>

KUP ONLINE

DANE KONTAKTOWE

+48 506 310 411
info@footwave.pl
www.footwave.pl

PUNKTY SPRZEDAŻY

footwave.pl/kontakt

PRZEDAWACIELE

footmedical.pl/kontakt

PRODUCENT I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

www.footmedical.pl
biuro@footmedical.pl

SOCIAL MEDIA


/FootWavePL
/footwave_wkladki_dynamiczne

JAK DZIAŁA WKŁADKA


FootWave™ PŁASKOSTOPIE POPRZECZNE



WIERZCH

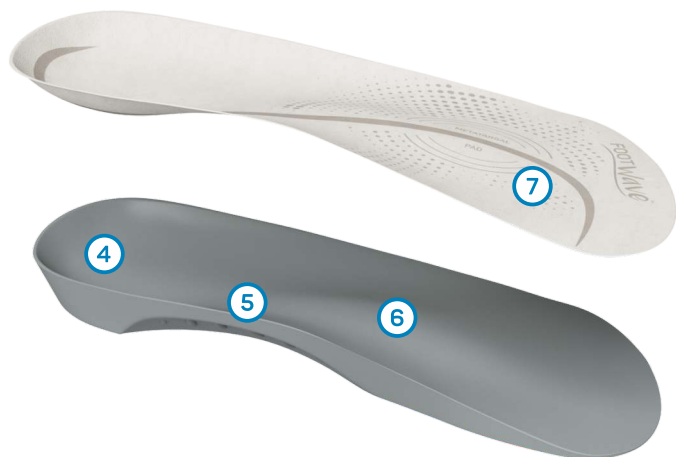

SPÓD

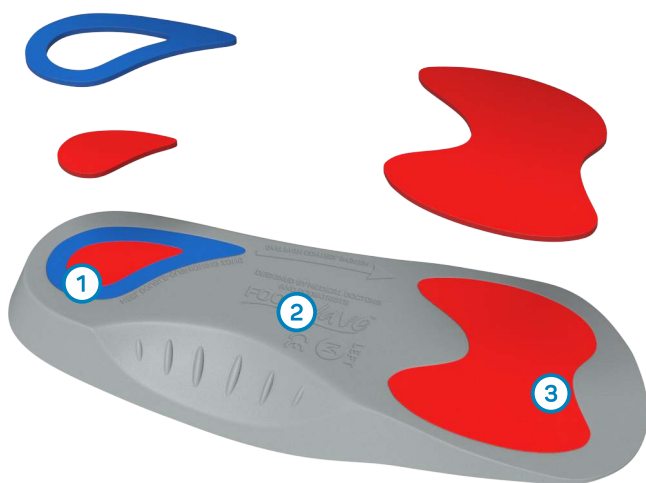

ELEMENT WKŁADKI	FUNKCJA	CO TO OZNACZA?
1 PODWÓJNY AMORTYZATOR KIERUNKOWY TYŁOSTOPIA	Absorpcja wstrząsów tyłostopia, kontrola ruchu 3D stawu skokowego, wprowadzenie w prawidłową supinację	Zmniejszy się ból pięty, a stopy będą poruszać się we właściwych kierunkach i zakresach ruchu
2 PŁASKI SPÓD WKŁADKI (PLATFORMA PODESZWOWA)	Stabilizacja, wyeliminowanie niekontrolowanej rotacji	Wkładki nie będą przekręcać się w obuwie w sposób niekontrolowany podczas chodu, dzięki czemu korekcja i wsparcie będzie zawsze prawidłowe
3 AMORTYZATOR PRZODOSTOPIA	Amortyzacja głów kości śródstopia	Miękka pelota działa jak poduszka - zwiększy komfort poruszania się oraz zapobiegnie tworzeniu się odcisków (modzeli) w tym miejscu
4 GŁĘBOKIE, PROFILOWANE KORYTKO PIĘTOWE	Prawidłowe ustawienie osi kończyny dolnej w pozycji neutralnej, stabilizacja, wyeliminowanie niekontrolowanej rotacji	Twoje stopy nie będą przekręcać się w trakcie poruszania, a nogi będą pracować w prawidłowych osiach (nie będą się koślawić / szpotawić, pięty nie będą "uciekać" na zewnątrz / do wewnątrz)
5 PODPARCIE ŁUKÓW PODESZWOWYCH	Wsparcie dla struktur anatomicznych stopy (odciążenie rozciągnięta podeszwowego)	Twoje łuki podeszwy (podłużny i poprzeczny) będą prawidłowo wysklepione, dzięki czemu stopy będą mniej się męczyć i pracować prawidłowo
6 PELOTA METATARSALNA	Dodatkowe wsparcie i odciążenie łuków podeszgowych	Zredukuje ból śródstopia i efektywniej przywróci kształt łuku podłużnego i poprzecznego oraz zapobiegnie powstawaniu odcisków i modzeli
7 WYŚCİÓŁKA Z MIKROFIBRY	Bezpieczeństwo, higiena, komfort	Miękki materiał zapobiega obtarciom, zapewnia wentylację i sprawia, że wkładki są bardzo wygodne

LINK DO TEGO PRODUKTU: <https://footwave.pl/wkladki-ortopedyczne/footwave-plaskostopie-poprzeczne>

KUP ONLINE

DANE KONTAKTOWE

+48 506 310 411
info@footwave.pl
www.footwave.pl

PUNKTY SPRZEDAŻY

footwave.pl/kontakt

PRZEDAWACIELE

footmedical.pl/kontakt

PRODUCENT I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

www.footmedical.pl
biuro@footmedical.pl

SOCIAL MEDIA

/FootWavePL
/footwave_wkladki_dynamiczne