

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PIŁECZKA REHABILITACYJNA Z KOLCAMI SOFT – ZESTAW
PILO-3011
„WYRÓB MEDYCZNY”

UWAGA! Przed przystąpieniem do pierwszego użycia wyrobu należy zapoznać się z niniejszym dokumentem.

Przy zakupie należy sprawdzić kompletność oraz stan jakościowy wyrobu. Ewentualne zastrzeżenia zgłosić osobie wydającej. Zgłaszając zastrzeżenia ilościowe/jakościowe, należy postępować zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej tj. przedstawić dowód zakupu oraz wypełnioną przez punkt detaliczny kartę gwarancyjną.

I. OPIS WYROBU

Piłeczka z kolcami przeznaczona do rehabilitacji, ćwiczeń dłoni i stóp oraz masażu ciała. Wyposażona w wypustki na całej powierzchni, które dodatkowo stymulują receptory na skórze, poprawiają ukrwienie i mikrokrążenie. Zmniejszają napięcie, rozluźniają mięśnie oraz odprężają

II. WŁAŚCIWOŚCI

Wykonane jest z najwyższej jakości materiału PVC, bezwonnego i nietoksycznego. Zestaw zawiera 3 piłeczki w rozmiarach 7cm, 8cm i 9cm

III. SPOSÓB UŻYCIA

1. Siedząc lub stojąc, zdejmij buty i wejdź lekko na piłkę. Przetaczaj piłkę w tył i w przód.
2. Użyj piłki do samodzielnego rozmasowywania mięśni ramion oraz szyi
3. Opierając się plecami o ścianę, umieść piłkę między szyją a łopatką. Delikatnie oprzyj się o ścianę i zwiń w górę i w dół lub na boki. Przytrzymaj, uciśnij, powtórz.



IV. SKŁAD

polichlorek winylu (PVC) 100%

V. ZASADY UŻYTKOWANIA

- Produkt i jego elementy należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem,
- Produkt należy utrzymywać w czystości zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji. Niewłaściwe czyszczenie i konserwacja wyrobu może prowadzić do zniszczenia..
- Produkt nie są zabawką. Nadzór dorosłych jest wymagany przez cały czas, gdy dzieci używają produktu.
- nie wystawiać na bezpośrednie działanie słońca.
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.









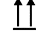




VI. PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować u pacjentów z zaburzeniami i czucia oraz osób ze zmianami skórnymi typu owrzodzenia, pęcherze, otarcia itp.
- przed użyciem zalecana jest konsultacja z rehabilitantem lub fizjoterapeutą.
- występowanie bólu podczas ćwiczeń
- stany zapalne stawów i tkanek okołostawowych
- obrzęki
- świeże blizny pooperacyjne lub inne rany

VII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Unikaj wysokiej temperatury
- Myj ciepłą wodą i delikatnym detergentem
- Nie używać środków ściernych
- Nie czyścić chemicznie
- Suszyć na płasko w zacienionym oraz przewiewnym miejscu – nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Produkt nie jest odporny na ciepło i traci swoje właściwości w wysokiej temperaturze.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Wytwórca
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Wyrób medyczny
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ostrzeżenie
	Numer serii
	Góra, nie przewracać
	Przechowywać w suchym miejscu
	Delikatne, obchodzić się ostrożnie
	Nie przecinać
	Opakowanie nadaje się do recyklingu



KARTA GWARANCYJNA
PILECZKA REHABILITACYJNA Z KOLCAMI SOFT – ZESTAW
PILO-3011

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęć sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Wyrób objęty jest 12 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że produkt był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa/Wymiana zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją pasa opisane w instrukcji użytkowania;
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia produktu
 - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.