

ARmedical®

3szt.

AR-061 Stabilizator palca - aparat Stacka z taśmą
dociągającą

Rozmiar:

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

Size:

--	--	--	--	--	--

Opis wyrobu: Stabilizator wykonany z lekkiego higienicznego tworzywa w kolorze cielistym. Bardzo skuteczny w przypadku terapii urazów palców

Zastosowanie: Oderwanie przyczepu prostownika paliczka dalszego, skręcenie stawu międzypaliczkowego dalszego, złamanie kości paliczków dalszych, uszkodzenie prostownika palca, złamanie awulsyjne

Sposób aplikacji: Mocuje się go do palca za pomocą taśmy dociągającej z rzepem - w taki sposób, aby staw międzypaliczkowy dalszy pozostawał w pozycji wyprostowanej

Sposób konserwacji: Myć mydłem w ciepłej wodzie, dokładnie osuszyć.

Przechowywanie: Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia.

Uwaga: Przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem specjalistą

Incydenty: Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.



Wydanie nr 4 z dnia 28.04.2023r.



ARMEDICAL Sp. z o.o.

ul. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel./fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

LOT

06/2023

MD

