

## OPIS PRODUKTU:

Dynamiczne wkładki FootWave™ HALLUX zaprojektowano w celu usunięcia skutków dolegliwości (ból, stan zapalny). Wkładki zatrzymują rozwój haluksów, ale przede wszystkim usuwają przyczynę ich powstawania stabilizując i przywracając prawidłową pracę tyłostopia. Pomagają zmniejszyć ból stóp oraz poprawiają ogólną postawę ciała. Dynamiczne wkładki ortopedyczne FootWave™ HALLUX kontrolują nadmierną pronację stopy (koślawość), stabilizują piętę, przywracają prawidłową ruchomość stawu skokowego dolnego oraz mobilizują ruchomość pierwszego promienia (duży palec). Przywracają anatomiczne wysklepienie łuków podszwowych (uniesienie metatarsalne) Polecane przez lekarzy pierwszego kontaktu, ortopedów, podiatrów oraz fizjoterapeutów.

## DOBÓR I CZYSZCZENIE WKŁADEK:

Wkładki FootWave mogą zostać przycięte w celu dopasowania rozmiaru do obuwia. Usuń fabryczne wkładki z butów przed włożeniem wkładek FootWave. Przyzwyczajaj stopy do wsparcia ich łuków używając wkładek przez kilka godzin dziennie, stopniowo zwiększając czas używania, aż do osiągnięcia pełnego komfortu. Wkładki można czyścić przy pomocy wilgotnej szmatki nasączonej mydłem. Nie należy ich moczyć, wkładać do pralki, suszarki oraz suszyć na kaloryferze.

## ZAOPATRUJĄC SIĘ WE WKŁADKI FOOTWAVE™ HALLUX:

- 1 **ODCZUJESZ ULGĘ W BÓLU DUŻEGO PALCA**  
Wkładki na haluksy zmniejszają nacisk i redukują wstrząsy, chroniąc obszary dużych palców, przodostopia, śródstopia i tyłostopia przed przeciążeniami, znacząco zmniejszając ból.
- 2 **ZATRZYMASZ ROZWÓJ HALUKSÓW**  
Wkładki na haluksy usuwają przyczynę powstawania tej dolegliwości (koślawe ustawienie tyłostopia w nadmiernej pronacji), dzięki czemu zapobiegają postępowaniu deformacji i zmniejszają ryzyko stanów zapalnych (bunionów).
- 3 **ZABEZPIECZSZ SIĘ PRZED I PO ZABIEGU**  
Warto zastosować wkładkę na haluksy w leczeniu operacyjnym, zarówno jako odciążenie przygotowujące do zabiegu, jak i zabezpieczenie po nim, chroniące przed nawrotem haluksów.
- 4 **PRZYWRÓCISZ KOMFORT PORUSZANIA SIĘ**  
Wkładki FootWave™ HALLUX wykonane są z najlepszej jakości materiałów, zapewniając wygodę dla stóp podczas chodzenia. Amortyzują wstrząsy, zapewniają wentylację i odciążają stopę.

## TABELA ROZMIARÓW:

| EXTRA SMALL<br>XS | SMALL<br>S | MEDIUM<br>M | LARGE<br>L | EXTRA LARGE<br>XL |
|-------------------|------------|-------------|------------|-------------------|
| 35 - 38           | 39 - 41    | 42 - 43     | 44 - 45    | 46 - 48           |

LINK DO TEGO PRODUKTU: <https://footwave.pl/wkladki-ortopedyczne/footwave-hallux>

KUP ONLINE

### DANE KONTAKTOWE

+48 506 310 411  
info@footwave.pl  
www.footwave.pl

### PUNKTY SPRZEDAŻY

footwave.pl/kontakt

### PRZEDAWACIELE

footmedical.pl/kontakt

### PRODUCENT I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

www.footmedical.pl  
biuro@footmedical.pl

### SOCIAL MEDIA

/FootWavePL  
/footwave\_wkladki\_dynamiczne


# JAK DZIAŁA WKŁADKA FootWave™ HALLUX

FOOTWave™

## WIERZCH



## SPÓD

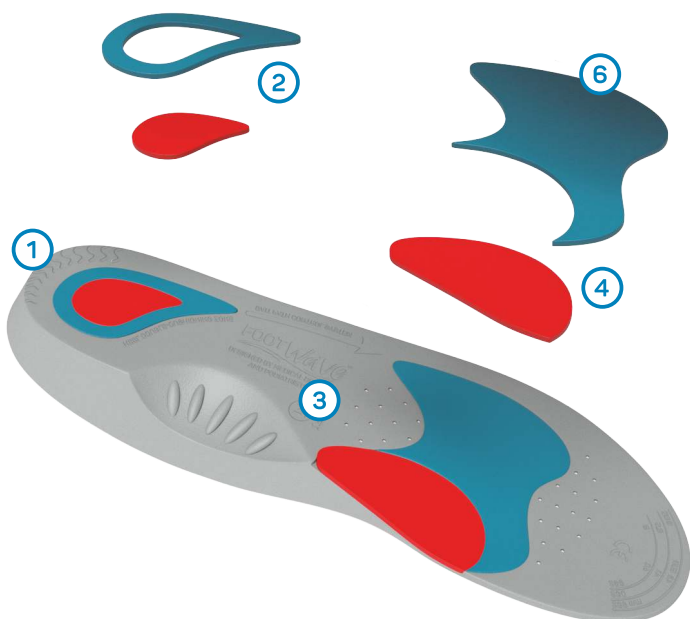

| ELEMENT WKŁADKI                                | FUNKCJA   | CO TO OZNACZA?  |
|--|---|---|
| 1 ŻŁOBIENIA (NACIĘCIA) SPODU TYŁOSTOPIA        | Zwiększenie przyczepności podeszwy części tyłostopia wkładki  | Dzięki żłobieniom wkładka lepiej przylega do obuwia i nie porusza się w nim w sposób niekontrolowany  |
| 2 PODWÓJNY AMORTYZATOR KIERUNKOWY TYŁOSTOPIA   | Absorbacja wstrząsów tyłostopia, kontrola ruchu 3D stawu skokowego, wprowadzenie w prawidłową supinację               | Zmniejszy się ból pięty, a stopy będą poruszać się we właściwych kierunkach i zakresach ruchu   |
| 3 PŁASKI SPÓD WKŁADKI (PLATFORMA PODESZWOWA)   | Stabilizacja, wyeliminowanie niekontrolowanej rotacji   | Wkładki nie będą przekreślać się w obuwia w sposób niekontrolowany podczas chodu, dzięki czemu korekcja i wsparcie będzie zawsze prawidłowe   |
| 4 PELOTA ORAZ<br>5 OBNIŻENIE POD HALUKSEM      | Amortyzacja i obniżenie głowy stawu śródstopno-paliczkowego pierwszego promienia (MTP-1)                              | Amortyzacja zmniejszy ból i dyskomfort, a obniżenie stawu sprawi, że palec będzie prawidłowo się poruszał   |
| 6 AMORTYZATOR PRZODOSTOPIA                     | Amortyzacja głów kości śródstopia   | Miękka pelota działa jak poduszka - zwiększy komfort poruszania się oraz zapobiegnie tworzeniu się odcisków (modzeli) w tym miejscu   |
| 7 GŁĘBOKIE, PROFILOWANE KORYTKO PIĘTOWE        | Prawidłowe ustawienie osi kończyny dolnej w pozycji neutralnej, stabilizacja, wyeliminowanie niekontrolowanej rotacji | Twoje stopy nie będą przekreślać się w trakcie poruszania, a nogi będą pracować w prawidłowych osiach (nie będą się koślawić / szpotawić, pięty nie będą "uciekać" na zewnątrz / do wewnątrz) |
| 8 PODPARCIE ŁUKÓW PODESZWOWYCH                 | Wsparcie dla struktur anatomicznych stopy (odciążenie rozciągniętego podeszwy)  | Twoje łuki podeszwy (podłużny i poprzeczny) będą prawidłowo wysklepione, dzięki czemu stopy będą mniej się męczyć i pracować prawidłowo   |
| 9 OTWORY (PERFORACJA) I WYŚCİÓŁKA Z MIKROFIBRY | Bezpieczeństwo, higiena, wentylacja, komfort  | Miękki materiał zapobiega obtarciom, zapewnia wentylację i sprawia, że wkładki są bardzo wygodne. Przez otwory perforacji stopy będą odprowadzać nadmiar ciepła i wilgoci                     |

LINK DO TEGO PRODUKTU: <https://footwave.pl/wkladki-ortopedyczne/footwave-hallux>

 KUP ONLINE

### DANE KONTAKTOWE

+48 506 310 411  
info@footwave.pl  
www.footwave.pl

### PUNKTY SPRZEDAŻY

footwave.pl/kontakt

### PRZEDAWACIELE

footmedical.pl/kontakt

### PRODUCENT I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

www.footmedical.pl  
biuro@footmedical.pl

### SOCIAL MEDIA

/FootWavePL  
/footwave\_wkladki\_dynamiczne