


FootWave™ KIDS SUPI PRO

POZIOM 3: STOPA PŁASKO-KOŚLAWA, BÓL PIĘTY

FOOTWave™

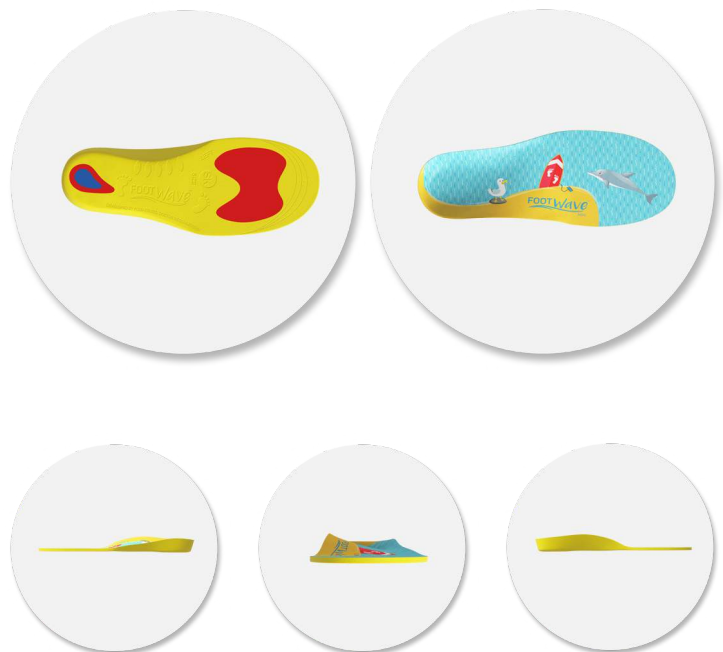

OPIS PRODUKTU:

Dynamiczne Wkładki FootWave™ KIDS SUPI PRO zapewniają wsparcie, które pozwala na przywrócenie Twojemu dziecku naturalnego wzorca chodu. Efektywnie leczą koślawość stóp i kolan oraz płaskostopie. Dzięki wyrównaniu osi ruchu stóp i stawów skokowych zapewniają one stopom dziecka naturalny rozwój, unikając w ten sposób wielu dolegliwościom i deformacjom. Mogą być stosowane do każdego obuwia, także szkolnego i sportowego.

W przypadku zaawansowanych dolegliwości stóp i szczególnych stanów chorobowych dziecka wskazana jest konsultacja z lekarzem lub specjalistą.

DOBÓR I CZYSZCZENIE WKŁADEK:

Wkładki FootWave mogą zostać przycięte w celu dopasowania rozmiaru do obuwia. Usuń fabryczne wkładki z butów przed włożeniem wkładek FootWave. Przyzwyczajaj stopy do wsparcia ich łuków używając wkładek przez kilka godzin dziennie, stopniowo zwiększając czas używania, aż do osiągnięcia pełnego komfortu. Wkładki można czyścić przy pomocy wilgotnej szmatki nasączonej mydłem. Nie należy ich moczyc, wkładać do pralki, suszarki oraz suszyć na kaloryferze.

ZAOPATRUJĄC SIĘ WE WKŁADKI FOOTWAVE™ KIDS SUPI PRO:

- 1 ROZPOCZNIESZ EFEKTYWNE LECZENIE KOŚLAWOŚCI I PŁASKOSTOPIA**
Budowa wkładki przywraca naturalny kształt stóp i zakres ich ruchu - stopy i kolana "wyprostują" się.
- 2 ZAPEWNI SZ WSPARCIA ŁUKÓW PODESZWOWYCH**
Opadnięte łuki podszewowe będą wysklepione i odbudowane. Będą prawidłowo kształtować się w okresie rozwoju.
- 3 ZAPEWNI SZ WYRÓWNANIE OSI KOŃCZYN DOLNYCH**
Wkładki Footwave™ KIDS SUPI PRO dają stopom naturalne wsparcie i stabilizację, przywracając im ich prawidłową oś stopy - kolana - biodra.
- 4 ZAPEWNI SZ KOMFORT PORUSZANIA SIĘ**
Miękki materiał wyściółki zapobiega obtarciom i sprawia, że wkładki są bardzo wygodne.

TABELA ROZMIARÓW:

XSK	SK	K	XS
28 - 29	30 - 31	32 - 34	35 - 38

LINK DO TEGO PRODUKTU: <https://footwave.pl/wkladki-ortopedyczne/footwave-kids-supi-pro>

 KUP ONLINE

DANE KONTAKTOWE

+48 506 310 411
info@footwave.pl
www.footwave.pl

PUNKTY SPRZEDAŻY

footwave.pl/kontakt

PRZEDAWACIELE

footmedical.pl/kontakt

PRODUCENT I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

www.footmedical.pl
biuro@footmedical.pl


SOCIAL MEDIA

/FootWavePL
/footwave_wkladki_dynamiczne


JAK DZIAŁA WKŁADKA FootWave™ KIDS SUPI PRO

FOOTWave™

WIERZCH

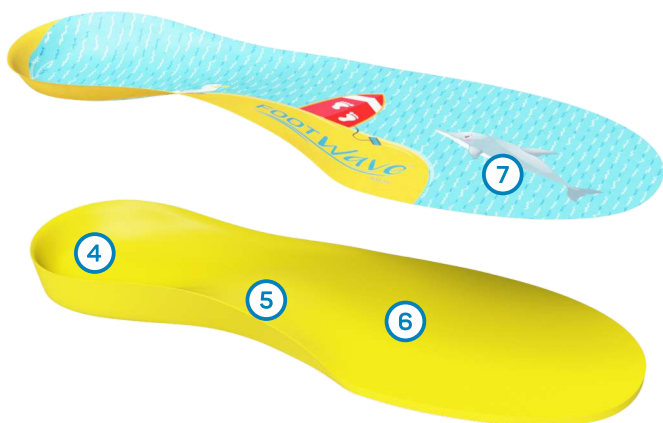

SPÓD

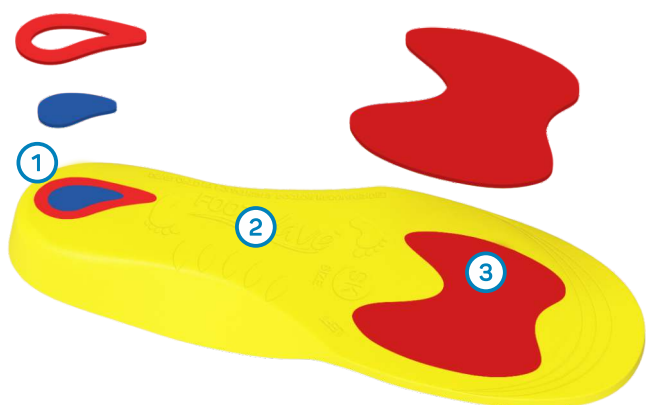

ELEMENT WKŁADKI	FUNKCJA	CO TO OZNACZA?
1 AMORTYZATOR KIERUNKOWY TYŁOSTOPIA	Absorbpcja wstrząsów tyłostopia, kontrola ruchu 3D stawu skokowego, wprowadzenie w prawidłową supinację	Twoje dziecko uniknie bólu pięty, a stopy będą poruszać się we właściwych kierunkach i zakresach ruchu
2 PŁASKI SPÓD WKŁADKI (PLATFORMA PODESZWOWA)	Stabilizacja, wyeliminowanie niekontrolowanej rotacji	Wkładki nie będą przekręcać się w obuwu w sposób niekontrolowany podczas chodu, dzięki czemu korekcja i wsparcie będzie zawsze prawidłowe
3 AMORTYZATOR PRZODOSTOPIA	Amortyzacja głów kości śródstopia	Miękka pelota działa jak poduszka - zwiększy komfort poruszania się oraz zapobiegnie tworzeniu się odcisków (modzeli) w tym miejscu
4 GŁĘBOKIE, PROFILOWANE KORYTKO PIĘTOWE	Prawidłowe ustawienie osi kończyny dolnej w pozycji neutralnej, stabilizacja, wyeliminowanie niekontrolowanej rotacji	Stopy Twojego dziecka nie będą przekręcać się w trakcie poruszania, a nogi będą pracować w prawidłowych osiach (nie będą się koślawić / szpotawić, pięty nie będą "uciekać" na zewnątrz / do wewnątrz)
5 PODPARCIE ŁUKÓW PODESZWOWYCH	Wsparcie dla struktur anatomicznych stopy (odciążenie rozciągniętego podszewowego)	Łuki podszewowe (podłużny i poprzeczny) będą prawidłowo wysklepione, dzięki czemu stopy będą mniej się męczyć i pracować prawidłowo
6 PELOTA METATARSALNA	Dodatkowe wsparcie i odciążenie łuków podszewowych	Zredukuje ból śródstopia i efektywniej przywróci kształt łuku podłużnego i poprzecznego oraz zapobiegnie powstawaniu odcisków i modzeli
7 WYŚCIÓŁKA Z MIKROFIBRY	Bezpieczeństwo, higiena, komfort	Miękki materiał zapobiega obtarciom, zapewnia wentylację i sprawia, że wkładki są bardzo wygodne

LINK DO TEGO PRODUKTU: <https://footwave.pl/wkladki-ortopedyczne/footwave-kids-supi-pro>

 KUP ONLINE

DANE KONTAKTOWE

+48 506 310 411
info@footwave.pl
www.footwave.pl

PUNKTY SPRZEDAŻY

footwave.pl/kontakt

PRZEDAWCIELE

footmedical.pl/kontakt

PRODUCENT I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

www.footmedical.pl
biuro@footmedical.pl

SOCIAL MEDIA

/FootWavePL
/footwave_wkladki_dynamiczne